

台北病理中心

文件及紀錄管制作業程序

QP-0801

機密等級：密

對外通告

編號：CP-2025-11

通告主旨：

日期：2025 年 06 月 25 日

- 一. 經由年度文件審閱，即日起修訂下列檢驗項目採檢手冊相關內容。
- 二. 為了提昇檢驗服務品質，請配合以下檢驗項目採集方式及運送保存條件。

說明：

- 一. 經由年度文件審閱，即日起修訂下列檢驗項目採檢手冊相關內容。

項 目	內 容
Pb ; Lead 血中鉛 健保編號：09049B	【參考區間】單位：ug/dL 成人 < 5 ； 孩童 < 3.5 (參考美國 CDC 血中鉛處置建議及規範) 勞工干預值：男 ≥ 40 ， 女 ≥ 30 原參考範圍： 參考美國標準：成人 < 10 ； 孩童 < 5 勞工干預值：男 ≥ 40 ， 女 ≥ 30 【保存條件】2-8°C 保存 7 天，-20°C 冷凍可穩定 28 天
Cd ; Cadmium 血中鉍 健保編號：10005B	【參考區間】單位：ug/L 血鉍：< 5.0 原參考範圍：< 3.9 【保存條件】2-8°C 可穩定保存 28 天
HbA1c 糖化血紅素 健保編號：09006B	【參考區間】單位：% < 5.7：正常 5.7-6.4：糖尿病前期 ≥ 6.5：糖尿病 加注*者可能有變異血色素(Hb variant) ≤ 4.0 或 ≥ 14.0 時請參考臨床表徵 原參考範圍： 4.0-6.0:兩次≥6.5:糖尿病 5.7-6.4:糖尿病高危險群 加注*者可能有變異血色素(Hb variant) ≤4.0或≥14.0時，請參考臨床表徵
ANA ; Anti-nuclear Antibody 抗核抗體 健保編號：12053C 單位：無	【參考區間】※內容不變，補充最下方說明文字 40X(-), ≥160X(+)有臨床意義 H: Homogeneous (AC-1) DFS: Dense fine speckled (AC-2) C: Centromere (AC-3) S: Speckled (AC-4) LS: Larged speckled (AC-5) D: Discrete nuclear dots (AC-6, AC-7) N: Nucleolar (AC-8, AC-9, AC-10) E: Nuclear envelope (AC-11, AC-12) PCNA: Proliferating cell nuclear antigen-like (AC-13) CENP-F: CENP-F-like (AC-14) topo I: DNA topoisomerase I (topo I)-like (AC-29) /C+: Cytoplasmic positive (AC-15~23) 其他未提及之核型則以實際觀察結果進行文字敘述說明

注意：任何個人、組織或團體在使用、複製、散播本文件之部分或全部內容前，應確定其合法授權，任何未經台北病理中心事前授權之使用、複製、散播，將違反台北病理中心管理規定，台北病理中心將依據相關法令規定追究其責任。

文件及紀錄管制作業程序	QP-0801	機密等級：密
-------------	---------	--------

對外通告

二. 為了提昇檢驗服務品質，請配合以下檢驗項目採集方式及運送保存條件。

檢驗項目	檢體採集方式及運送保存條件
Calcitonin 降血鈣素 健保代碼：09115B	1. 請以冷凍方式運送保存 2. 獨立一管送檢 3. 說明：開單項目為左側其中任一項，請務必獨立一管送檢，以免因重複解凍影響結果或延誤報告時效。
Gastrin 胃泌激素 健保代碼：09132B	
17-OHP 17-氫氧基黃體脂酮 健保代碼：27057B	

發佈單位：台北病理中心 生化免疫組

QR-0801-01

核發章：

