

台北病理中心

文件及紀錄管制作業程序	QP-0801	機密等級：密
-------------	---------	--------

對外通告

編號：CP-2024-04

日期：2024 年 02 月 19 日

通告主旨：

- 為了維持檢驗品質及不影響結果報告發出時效，以下檢驗項目(如附表)請各自獨立採集檢體樣本送檢，避免與其他檢驗項目共用。
- Chlamydia trachomatis Ag(包衣體試驗)檢體採集注意事項說明。

造成不便，敬請見諒。

說明：

- 下列表格所列項目請「獨立」採集檢體樣本：

編號	檢驗項目	中文名稱	健保代碼	保存方式
1	Aldosterone	醛固酮	27031B	冷凍運送
2	Plasma Renin Activity	血漿腎素活性	27032B	
3	ACTH	促腎上腺皮質素	09119B	
4	Gastrin	胃泌激素	09132B	
5	17 α -OH-progesterone(17-OHP)	17-氫氧基黃體脂酮	27057B	
6	Factor 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ※送驗項目超過兩項以上時，請提供至少兩管檢體以防檢體量不足。	凝血因子	08057B~08062B 08080B、08081B	
7	Factor VIII Inhibitor	第八因子抑制因子測定	08067B	
8	Anti-thrombin III	抗凝血 III	08072B	
9	Protein C 及 Protein S	蛋白 C 及蛋白 S	08077B 以及 08122B	
10	Lupus anticoagulant	狼瘡抗凝血因子	08126B	
11	Von willebrand factor	溫韋伯氏因子	08118B	
編號	檢驗項目	中文名稱	健保代碼	保存方式
12	CO2	二氧化碳	09024C	冷藏運送
13	Aspergillus Ag	麴菌抗原	12179C	

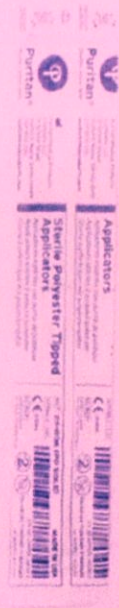
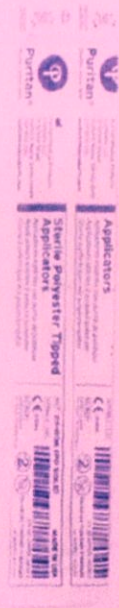
QR-0801-01

QP-0801(1v0)

台北病理中心

文件及紀錄管制作業程序	QP-0801	機密等級：密
-------------	---------	--------

2. Chlamydia trachomatis Ag(包衣體試驗；健保代碼：12016C)檢體採集注意事項
說明如下：

性別	檢體收集方式	檢體保存方式	採檢容器圖示
男性	男性尿液檢體採集方法： 早晨第一泡前段尿液最佳，可獲得最高濃度的Chlamydia抗原新鮮檢體為佳，約15-30 mL。	2-8℃保存1日	 15-30mL，收集兩管尿液
	男性尿道拭子採集方法： 應使用標準塑膠桿或細桿拭子採集尿道檢體。請告知患者在採集檢體前一小時內不可排尿。將拭子插入尿道約2-4公分，朝一個方向用力將拭子360度旋轉(順時針或反時針)，使其靜置10秒，接著取出拭子。		 Poly Swab棉棒
女性	※女性請避免使用尿液檢體。 女性子宮頸拭子採集方法： 在採集檢體前，用棉球擦去子宮頸內部位的多餘黏液，並將棉球丟棄。拭子應插入子宮頸內管中，穿過鱗柱狀上皮交界處(squamocolumnar junction)，直到無法再看見大部分尖端為止，如此可獲取柱狀或立方上皮細胞，此類細胞為Chlamydia致病原的主要傳染窩。朝一個方向用力將拭子360度旋轉(順時針或反時針)，使其靜置15秒，接著取出拭子。請避免子宮頸外或陰道細胞污染。	2-8℃保存3日	 Poly Swab棉棒
檢體退件標準	(1)尿液檢體已離心、冷凍尿液或已超過保存期限。 (2)木質棉棒、使用0.9% NaCl處理過的棉棒或細菌培養棉棒(含agar gel)皆不適用。		
備註	可來電索取Chlamydia trachomatis Ag專用採檢棒，聯絡方式為：02-85962050 分機301		

發佈單位：台北病理中心 生化免疫組
核發章：



QR-0801-01
QP-0801(1v0)