

台北病理中心

文件及紀錄管制作業程序

QP-0801

機密等級：密

對外通告

編號：CP-2025-08

日期：2025 年 04 月 07 日

通告主旨：檢驗項目 Eosinophil Cationic Protein(ECP，嗜伊紅性白血球陽離子蛋白)，自 2025 年 04 月 07 日(一)收回檢體轉為自行操作，紙本報告將於 04 月 09 日(三)開始寄送。依照採檢手冊內容說明檢體採集保存、每週操作日、參考區間及臨床可發報告範圍等資訊。

造成不便，敬請見諒。

說明：

項 目	說 明
Eosinophil Cationic Protein (ECP，嗜伊紅性白血球陽離子蛋白) 健保編號：30023B	【檢體採集】 1. 必須為血清檢體 2. 使用含有促凝劑的分離膠採血管收集血液，並將血液抽滿採集管。 3. 採集後將管子上下輕柔翻轉數次，勿以渦流震盪或大力搖晃。 4. 檢體請放置室溫條件(適合溫度 19-25℃)，靜置 60-120 分鐘，使嗜伊紅性白血球充分釋放 ECP。 5. 室溫環境下以 1000-1300 g 離心 10 分鐘。再將血清分離至另一新試管保存。 【檢體保存】 2-8℃ 保存 5 天，長期保存需於-20℃ 保存 【報告時效】每週二、四操作，當日報告 【參考區間】 <15.0 μg/L (參考區間不變) 【分析儀器】Phadia 250 【臨床可發報告範圍】0.5 - 200 ug/L

發佈單位：台北病理中心 生化免疫組

核發章：



注意：任何個人、組織或團體在使用、複製、散播本文件之部分或全部內容前，應確定其合法授權，任何未經台北病理中心事前授權之使用、複製、散播，將違反台北病理中心管理規定，台北病理中心將依據相關法令規定追究其責任。